

# Bedienung des Defibrillators *ME PAD Automatik*



1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Halterung im Eingangsbereich unseres Clubheims.
2. Stellen Sie den Auswahlschalter *Erwachsener/Kind* (jünger als acht Jahre/leichter als 25 kg) dem Patienten entsprechend ein; der Auswahlschalter ist auf *Erwachsener* voreingestellt.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Folgen Sie sodann der Sprachanweisung des Gerätes!!!